



**Fastect® II Procedure** – Se det vedlagte materiale i pakken for en detaljeret instruktion og teknisk information.


1. **Fjern** Fastect® II testen fra den forseglede indpakning og **før beskyttelseshætten** hele vejen op.

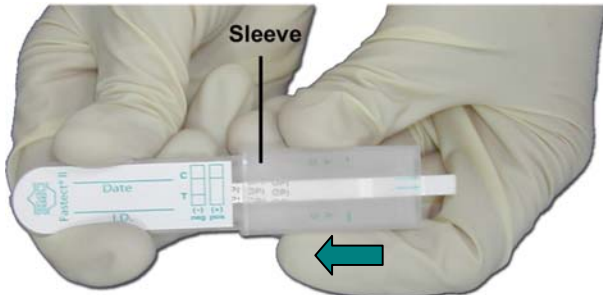

2. Dyp testens opsamlingspude ned i urinen op til det maksimale dyp niveau i mindst 10 sekunder. **Dyp op til og ikke forbi "Tips of Arrows"**.

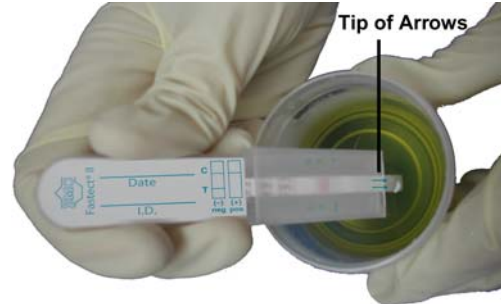

3. **Før** beskyttelseshætten ned til **"Read Indicator Mark"** og læg testen på en plan overflade.

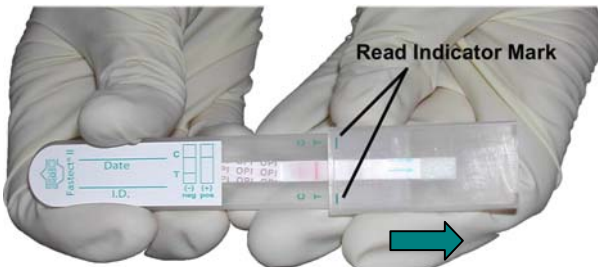

4. **Aflæs** resultatet når **Kontrolstreg(C)** kan ses (efter ca. 5 minutter). Resultatet kan aflæses indtil 1 time efter prøven er taget. Aflæs ikke efter 1 time.




## Aflæsning af Fastect® II Test Resultat

### Ugyldigt Resultat

Ingen streg i **KONTROL(C)** området: **testen er ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. Gentag derefter de 4 punkter med en ny test.

Eksempel:

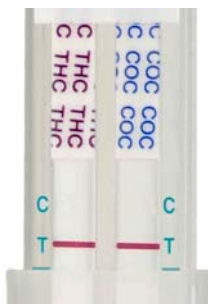

THC: Ugyldig  
COC: Ugyldig


### Negativt Resultat

For hvert stof, skal to farvede streger kunne ses:

- **En i KONTROL(C) område**
- **En i det specifikke TESTområde**

Farven på stregerne kan variere i styrke. Hvis en streg kan ses med det blotte øje, er resultatet **negativt**.

Eksempel:

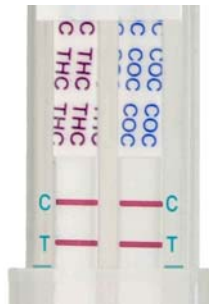

THC: Negativ  
COC: Negativ

### Antageligt Positivt Resultat

En farvet streg i **KONTROL(C)** området skal komme til syne. Når der ikke er nogen farvet streg i det specifikke **TESTområde**, så er testen antageligt positiv for det pågældende stof.

Eksempel:



THC: Negativ  
COC: **Positiv**

### Ordforklaring:

THC: Hash, MET: Methamfetamin, AMP: Amfetamin, COC: Kokain, OPI: Opiater, BZO: Benzodiazepiner,