


Se det vedlagte materiale i pakken for en detaljeret instruktion og teknisk information..

- Fjern** narkotesten fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
- Fjern** bundcoveret. (teststripsene vil nu komme til syne)

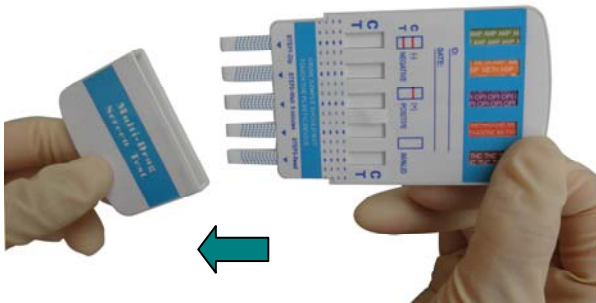


- Dyp narkotesten i urinprøven i minimum 10 sekunder. **Dyp til spidserne af pilene, ikke forbi.**



- Fjern** narkotesten fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
- Læg testen på en plan overflade.



Test for stoffer: Aflæs resultatet når **Kontrolbåndet (C)** fremkommer (efter cirka 5 minutter). Resultatet er stabilt, og kan tolkes op til en 1 time efter Kontrolbåndet fremkommer. Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

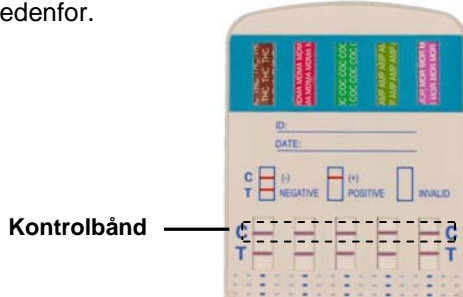

Aflæsning af narkotesten


Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- **En i KONTROL(C) området**
- **En i det specifikke TEST område**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et Negativt resultat.

Eksempel på aflæsning:

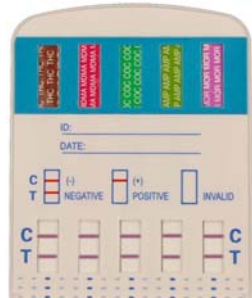


THC: Negativ
MDMA: Negativ
COC: Negativ
AMP: Negativ
MOR: Negativ

Positivt Resultat

I **KONTROL(C) området** skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen antageligt positiv for det pågældende stof.

Eksempel på aflæsning:

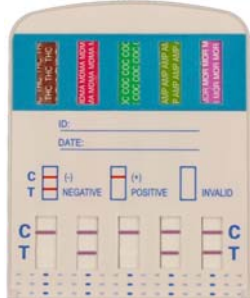


THC: Positiv
MDMA: Negativ
COC: Positiv
AMP: Negativ
MOR: Negativ

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for KONTROL(C) området: testen **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. **Gentag** med en ny narkotest.

Eksempel på aflæsning:

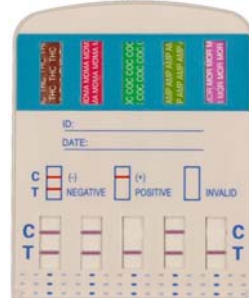

THC: Ugyldig
MDMA: Ugyldig
COC: Ugyldig
AMP: Ugyldig
MOR: Ugyldig

Ordforklaring:

THC: Hash, **MDMA:** Ecstasy, **COC:** Kokain, **AMP:** Amfetamin, **MOR:** Opiater, **MET:** Methamfetamin
BZO: Benzodiazepiner, **MTD:** Metadon, **BAR:** Barbiturater, **PCP:** Phencyclidine