



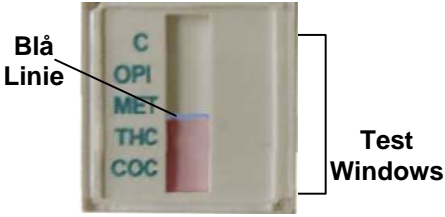
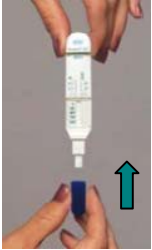
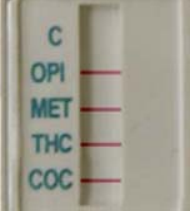




OratectXP Procedure – Se det vedlagte materiale i pakken for en detaljeret instruktion og teknisk information.

<p>1. Fjern den blå hætte ved at holde forsigtigt på siderne. En opsamlingspude vil nu komme til syne. Vær opmærksom på, at der er en blå linie i testvinduet.</p> 	<p>2. Åben munden og gnid forsigtigt opsamlingspuden mod indersiden af kinden i cirkulære bevægelser ca. 15-20 gange. Hold hovedet stabilt.</p> 	<p>3. Gnid opsamlingspuden forsigtigt mod den modsatte kind i cirkulære bevægelser ca. 15-20 gange.</p> 
<p>4. Gnid forsigtigt opsamlingspuden oven på tungen ca. 15-20 gange. Bid, tyg, sug eller bøj ikke opsamlingspuden.</p> 	<p>6. Placer opsamlingspuden under tungen i ca. 30 sekunder for at opsamle spyt. Instruer donoren om at holde den på plads med sin hånd. Når der er samlet nok spyt, kan det ses ud fra strømmen fra den blå linie. Gentag trin 2-6 indtil den blå linie flyder.</p>  <p style="margin-left: 20px;">Blå Linie</p> <p style="margin-left: 200px;">Test Windows</p>	<p>7. Fjern den fra munden så snart den blå linie begynder at flyde. Sæt derefter hæften på.</p>  <p>8. Læg OratectXP på en plan flade, og afslæs resultatet tidligst 5 minutter og senest 30 minutter efter testen.</p>

Afslæsning af OratectXP Test Resultat

<p><u>Ugyldigt Resultat</u> Ingen streg ud for KONTROL(C) området: testen ugyldig, selvom der er linier i testområdet. Gentag testen med en ny OratectXP.</p> <p>Eksempel:</p>  <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>OPI:</td><td>Ugyldig</td></tr> <tr><td>MET:</td><td>Ugyldig</td></tr> <tr><td>THC:</td><td>Ugyldig</td></tr> <tr><td>COC:</td><td>Ugyldig</td></tr> </table>	OPI:	Ugyldig	MET:	Ugyldig	THC:	Ugyldig	COC:	Ugyldig	<p><u>Negativt Resultat</u> For hver test skal der fremkomme 2 linier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En i KONTROL(C) området • En i det specifikke TESTområde <p>Tydigheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et Negativt resultat.</p> <p>Eksempel:</p>  <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>OPI:</td><td>Negativ</td></tr> <tr><td>MET:</td><td>Negativ</td></tr> <tr><td>THC:</td><td>Negativ</td></tr> <tr><td>COC:</td><td>Negativ</td></tr> </table>	OPI:	Negativ	MET:	Negativ	THC:	Negativ	COC:	Negativ	<p><u>Antageligt Positivt Resultat</u> I KONTROL(C) området skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen antageligt positiv for det pågældende stof.</p> <p>Eksempel:</p>  <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>OPI:</td><td>Negativ</td></tr> <tr><td>MET:</td><td>Positiv</td></tr> <tr><td>THC:</td><td>Negativ</td></tr> <tr><td>COC:</td><td>Negativ</td></tr> </table>	OPI:	Negativ	MET:	Positiv	THC:	Negativ	COC:	Negativ
OPI:	Ugyldig																									
MET:	Ugyldig																									
THC:	Ugyldig																									
COC:	Ugyldig																									
OPI:	Negativ																									
MET:	Negativ																									
THC:	Negativ																									
COC:	Negativ																									
OPI:	Negativ																									
MET:	Positiv																									
THC:	Negativ																									
COC:	Negativ																									

Ordforklaring: OPI: Opiater, MET: Methamfetamin, THC: Hash, COC: Kokain

Detektionstider: Op til 2 dage for OPI, MET og COC, Op til 4 timer for THC.