



**QuickTox® Procedure** -- Se det vedlagte materiale i pakken for en detaljeret instruktion og teknisk information..

1. Fjern QuickTox® testen fra den forseglede pose, ved at rive i hjørnet.
2. Fjern bundcoveret. (teststripsene vil nu komme til syne)

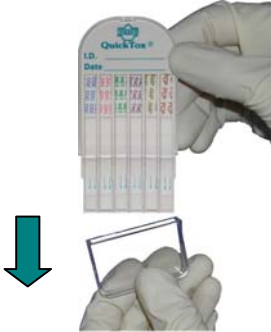


3. Dyp QuickTox® prøvens strips lige ned i urinprøven i minimum 10 sekunder. **Dyp til spidserne af pilene, ikke forbi.**

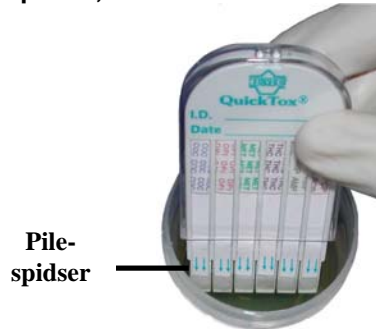

4. Fjern QuickTox® testen fra urinprøven og sæt bundcoveret på igen.
5. Læg testen på en plan overflade.




6. **Manipulationstest:** Efter et minut, sammenlignes farverne fra manipulationstesten med det vedlagte farve skema. **Aflæs ikke resultatet efter 2 minutter, da farverne kan ændre sig.**

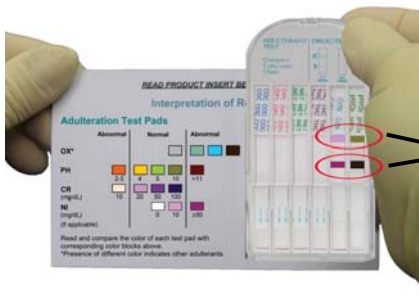

Farve klods

7. **Test for stoffer:** Aflæs resultatet når **Kontrolbåndet (C)** fremkommer (efter cirka 5 minutter eller mindre). Resultatet er stabilt, og kan tolkes op til en 1 time efter Kontrolbåndet fremkommer. Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

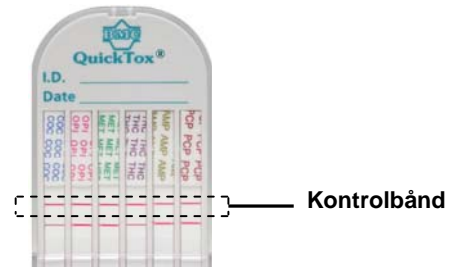

## Aflæsning af QuickTox® Test Resultat


### Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- En i **KONTROL(C)** området
- En i det **specifikke TEST** område

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et Negativt resultat.

Eksempel på aflæsning:

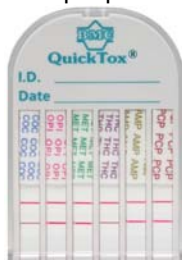

COC: Negativ  
OPI: Negativ  
MET: Negativ  
THC: Negativ  
AMP: Negativ  
PCP: Negativ

### Antageligt Positivt Resultat

I **KONTROL(C)** området skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen antageligt positiv for det pågældende stof.

Eksempel på aflæsning:



COC: **Positiv**  
OPI: Negativ  
MET: Negativ  
THC: **Positiv**  
AMP: Negativ  
PCP: Negativ

### Ugyldigt Resultat

**Ingen streg ud for KONTROL(C) området:** testen **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. **Gentag** testen med en ny QuickTox®.

Eksempel på aflæsning:



COC: Ugyldig  
OPI: Ugyldig  
MET: Ugyldig  
THC: Ugyldig  
AMP: Ugyldig  
PCP: Ugyldig

### Ordforklaring:

**THC:** Hash, **MET:** Methamfetamin, **AMP:** Amfetamin, **COC:** Kokain, **OPI:** Opiater, **BZO:** Benzodiazepiner, **MTD:** Metadon, **BAR:** Barbiturater, **PCP:** Phencyclidine **BUP:** Buprenorphin