

ToxCup® Brugervejledning

ToxCup® Procedure -- Se det vedlagte materiale i pakken for en detaljeret instruktion og teknisk information.

1. **Åben** den forseglede pose og tag testlåget ud.



2. **Skru** testlåget godt fast på den medfølgende opsamlingskop.



3. **Sæt** Toxcupen på dens fødder for at aktivere processen.




4. **Manipulationstest:** Efter et minut, sammenlignes farverne fra manipulationstesten med det vedlagte farve skema. **Aflæs ikke resultatet efter 2 minutter, da farverne kan ændre sig.**

Farve-skema



5. **Test for stoffer:** Aflæs resultatet når **Kontrol båndet (C)** fremkommer (efter cirka 5 minutter eller mindre). Resultatet er stabilt, og kan tolkes op til en 1 time efter Kontrolbåndet fremkommer. Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

Kontrolbånd

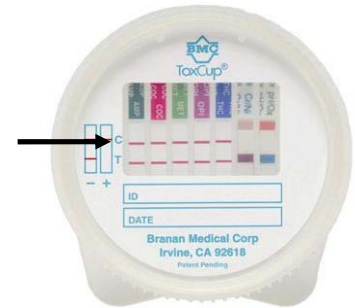

Aflæsning af ToxCup® Test Resultat

Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- **En i KONTROL(C) området**
- **En i det specifikke TEST område**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et Negativt resultat.



Eksempel på aflæsning:

AMP: Negativ
COC: Negativ
MET: Negativ
OPI: Negativ
THC: Negativ

Antageligt Positivt Resultat

I **KONTROL(C) området** skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen antageligt positiv for det pågældende stof.



Eksempel på aflæsning:

AMP: Negativ
COC: **Positivt**
MET: Negativ
OPI: Negativ
THC: **Positivt**

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for **KONTROL(C) området:** testen **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. **Gentag** testen med en ny ToxCup®.



Eksempel på aflæsning:

AMP: **Ugyldig**
COC: Negativ
MET: Negativ
OPI: **Ugyldig**
THC: Negativ

Ordforklaring:

THC: Hash, MET: Methamfetamin, AMP: Amfetamin, COC: Kokain, OPI: Opiater, PCP: Phencyclidine